



## CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA COM MANDRIL

PRODUTO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO

- Componentes: CATETER, MANDRIL e SERINGA.

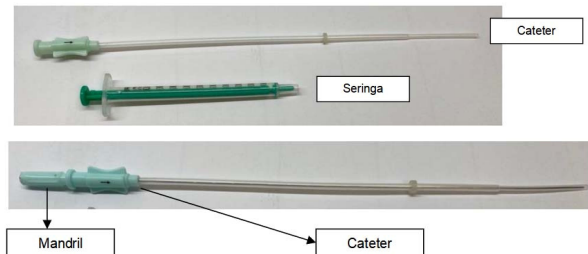

- O CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA é usado para a introdução de espermatozóides lavados na cavidade uterina através do colo do útero.

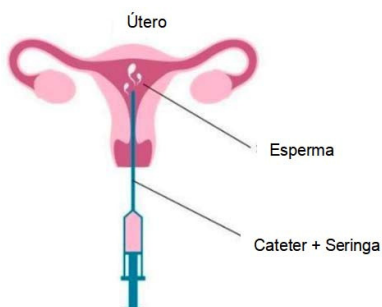

- Esterilizado por Óxido de Etileno.

### Tamanhos:

- Cateter: 22cm
- Mandrill: 21cm
- Seringa: 1mL

### Indicação de uso:

- O CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA COM MANDRIL é usado para a introdução de espermatozóides lavados na cavidade uterina através do colo do útero em caso de dificuldades.

### Modo de Uso:

1. Posicione a paciente em posição de litotomia. Insira o espéculo vaginal para expor o colo do útero e decidir o comprimento de inserção do cateter.
2. Lave a vagina com soro fisiológico esterilizado e seque-a.
3. Carregue a seringa com solução de esperma lavada.
4. Insira o cateter com mandril no colo do útero.
5. Remova o mandril do cateter.
6. Conecte a seringa ao conector do cateter.
7. Após a inserção na cavidade uterina, pressione lentamente a seringa e expulse a solução de esperma ou lavada espermatozóides na cavidade uterina.
8. Remova cuidadosamente o cateter.
9. Descarte a seringa e o cateter e o mandril como produto de risco biológico.

### Formas de apresentação:

- Embalagem primária: Kit acondicionado em embalagem de papel grau cirúrgico + tyvek.
- Embalagem secundária: acondicionado em papel cartolina.

### Condições de Armazenamento e Transporte:

- Estocar em local seco, fresco e protegido da luz solar, à temperatura ambiente (15°C à 30°C).
- Transportar em local seco, fresco e protegido da luz solar, à temperatura ambiente (15°C à 30°C).
- Transportar em sua embalagem própria.

### Advertências e Precauções:

- Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.
- Não re-utilizar.
- A seringa não é indicada para uso de injeção hipodérmica.
- Produto médico hospitalar de uso único.
- Descartável.

### Contra-Indicação:

- A seringa não é indicada para uso de injeção hipodérmica.








### IMPORTADOR:

INTERMEDICAL SERVICE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA  
Rua da Conceição, 125 - Sala 1011 - Centro - Niterói/RJ  
CNPJ: 11.205.033/0001-94  
Notificação ANVISA nº: 81931150004  
Responsável Técnica: Paula Fontoura Coelho de Souza  
- CRBIO-RJ 71021/02

### FABRICANTE:

IDEH VARZAN FARDA (IVF) COMPANY  
Nº 117, Building nº 2, Tehran Technology Park, Farshi Moghaddam (16th) Ave., North Amirabad Ave., Terã, Irã.

**Prazo de validade:** 3 anos.

<b>REF</b>	Número do catálogo	<b>STERILIZADO</b>	Esterilizado por óxido de etileno
	Consulte as instruções de uso		Não reutilize
<b>LOT</b>	Lote		Proteja da luz solar
	Data de fabricação		Mantenha seco
	Usar antes de		Quantidade por caixa