



FITA DE PH JOHNSON

Códigos dos Produtos:

127.2C

Fita com indicador de pH para avaliação do pH seminal.

- pH 6.5 - 10.0
- Graduação: 0.3 (6.5 a 7.7); 0.2 (7.7 a 8.7); 0.3 (8.7 a 9.0) e 0.5 (9.0 a 10.0)
- 100 unidades

Cada caixa contém 100 fitas de pH. Modo de uso. Com auxílio de uma pipeta Pasteur, pingue uma gota de sêmen liquefeito na ponta da fita de pH. Aproxime a ponta da fita à escala de cores da caixa. Verifique a coloração da fita que mais se aproxima à da escala de cores, para obter o valor do pH do sêmen. A medição do pH deve ser feita até meia hora após a coleta de sêmen para uma melhor avaliação.